


Информация за употреба.
Моля, прочетете внимателно!



Фиксира здраво Вашите протези. **Protefix**[®]

Protefix[®] Фиксиращ крем за зъбни протези с Алое Вера

Много силен • Ефективен и върху мокра основа • За чувствителна лигавица

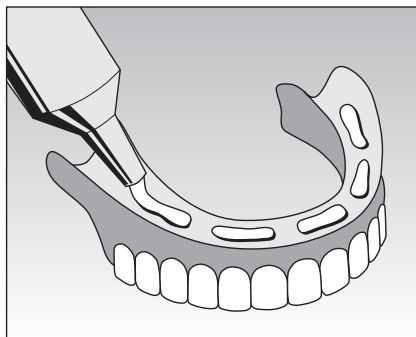

Приложение

Protefix[®] Фиксиращ крем за зъбни протези с Алое Вера

Дозировка и начин на приложение

Дневна дозировка: До 0,8 g фиксиращ крем (приблизително 7 см).


Начин на употреба: Почистете протезата и лигавицата от хранителни остатъци. Притискайки тубата в долната трета близо до отвора, нанесете **Протефикс Фиксиращ крем с Алое Вера** върху зъбната протеза (във вдълбнатините, които са в директен контакт с челюстта). След това поставете протезата и я притиснете силно на мястото ѝ за няколко секунди. Изчакайте 5 минути преди хранене. При необходимост, може да нанесете фиксиращ крем и по задния край на горната протеза. **Протефикс Фиксиращ крем с Алое Вера** трябва да се нанася икономично, тъй като прекомерното количество може да промени позицията на Вашата протеза и да влоши фиксацията. **Протефикс Фиксиращ крем с Алое Вера** може да се нанася върху влажни и сухи зъбни протези. След нанасяне на крема, затворете тубата внимателно, като се стремите отворът да остане сух и чист, защото всяко навлизане на течност би могло да предизвика втвърдяване на крема. Поупорити остатъци от фиксиращ крем могат да бъдат отстранени с вълнено (памучно) парче плат натопено в олио (или течна мазнина, подходяща за консумация). При определени обстоятелства олио може да остане по протезата, но това няма да промени фиксиращата сила на крема. Моля, просто отстранете олиото от протезата. Зъбните протези не могат да бъдат залепени постоянно върху лигавицата и употребата на фиксиращ крем трябва да бъде само временна.

Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките.

Нежелани ефекти

В изолирани случаи, реакции на свръхчувствителност от страна на лигавицата на устата или дори системни такива, не могат да бъдат изключени. Ако подозирате наличието на реакция на свръхчувствителност, моля, свържете се с Вашия стоматолог.

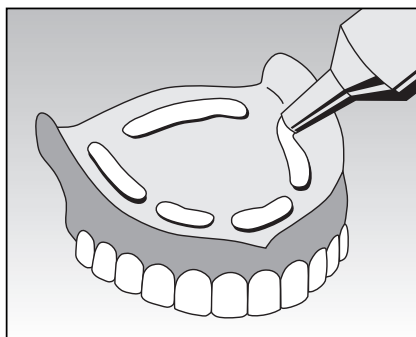

Моля, спазвайте следните важни съвети:

- Да се употребява само върху здрава лигавица.
- Пазете далеч от деца.
- Не употребявайте след изтичане на срока на годност.
- Да се пази от висока температура (над 25° C)!

Състав

Микстура от натриеви и калциеви соли на кополимера метилвинил етер и анхидрид на малеиновата киселина, карбоксиметил целулоза, парафин, вазелин, Алое Вера *Barbadensis Miller*, силициев диоксид, ментол, азорубин, метилов естер на пента-хидрокси-бензоената киселина. – Не съдържа цинк.

Последна редакция на текста: 09/2015.

Произведено в Германия


Queisser
PHARMA
D-24914 Flensburg
www.queisser.com

Контакт за България:
info@queisser.bg
www.protefix.bg



90724916 BG