
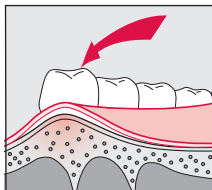
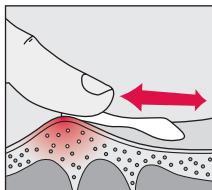


Инструкция за употреба!
Моля, прочетете внимателно!

Protifix® Протект гел

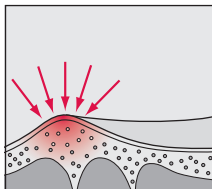

Състав:

Protifix® Протект гел
съдържа:

Глицерол-оксид-триестер
(TGO), безводен
колоидален силициев
диоксид, захарин - натрий,
ароматизант.

Protifix® Протект Гел подпомага бързото
зарастване на рани в устната кухина.

Начин на употреба:

Изплакнете устата. Ако е необходимо, премах-
нете остатъците от фиксиращи продукти за
протези.

Изстискайте малко количество **Protifix®**
Протект гел, приблизително колкото големината
на грахово зърно, и с помощта на чист памучен
тампон или с пръст нанесете върху засегнатата
зона 3 – 4 пъти дневно, като леко масажирате.

Моля, поставайте се да разнесете образувания
протективен филм колкото е възможно равно-
мерно за максимално продължителен ефект.

Изчакайте 15 мин. преди да приемате храна и
течности.

Не изплаквайте устата си веднага след прилага-
не на протективния гел.

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някои от съставките.

Нежелани реакции:

Protifix® Протект гел трябва да се използва
спрямо посочените показания, но не може да
замести консултация с лекар.

Когато симптомите продължат повече от 5 дни
или настъпи влошаване (особено кървене или
инфекции), трябва да се потърси консултация
с лекар или стоматолог. Ако се подозира
реакция на свръхчувствителност, задължително
прекратете употребата на продукта и потър-
сете консултация с лекар. Когато се прилага
на твърде голяма повърхност, е възможно да
окаже ефект върху действието на фиксиращи
продукти.

Внимание! Моля, прочетете следните предупреждения:

- Използвайте **Protifix®** Протект гел само при посочените показания
- Плътно затваряйте тубата след употреба, пазете отвората чист и сух
- Съхранявайте далеч от деца
- Не използвайте след изтичане срока на годност



Protefix® Протект гел е медицинско изделие, което се прилага при възпаления на лигавицата на устата като афти и рани, които могат да бъдат причинени и от ортодонтически апарати, зъбни протези и др. Съдържа Глицерол-оксид-триестер (TGO), който се добива от специална растителна мазнина по нов, патентован метод.

Protefix® Протект гел:

Създава протективен филм, който предпазва раната от външни механични и химични дразнения

Успокоява болката

Ускорява заздравянето на рани в устната кухина

Протективният филм стимулира регенерацията на околните клетки, което подпомага заздравителния процес и увеличава устойчивостта на лигавицата.

Последна редакция на текста: 01/2016.

Производител: Куайсер Фарма
Schleswiger Strasse 74, 24941
Flensburg, Германия

Представителство за България:
ТП КУАЙСЕР ФАРМА
София, бул. „Св. Климент Охридски“ 25
тел. 024412764
info@queisser.bg www.protefix.bg


Queisser
PHARMA
24914 Flensburg-Germany
www.queisser.com

